

# ***Jak používat počítačový interface***

Tento měřič krevního tlaku má počítačový interface a je vybaven počítačovým softwarem k přenosu uložených dat do Vašeho počítače.

## **Požadované provozní prostředí**

K tomu, aby fungoval komunikační program dodávaný na CD-ROM, je zapotřebí následující provozní prostředí:

Osobní počítač	:	PC/AT kompatibilní s CPU 80486 a výše nebo s jakýmkoliv procesorem Pentium.
Operační systém	:	Windows 98SE/ME/XP/2000
Paměť (RAM):	:	alespoň 16 MB
Pevný disk	:	volná kapacita minimálně 10 MB
Displej	:	alespoň 640 x 480 pixelů
Mechanika	:	CD-ROM mechanika
Port pro připojení	:	volný USB port

## **Jak nainstalovat program**

- 1) Zapněte Váš osobní počítač  
.....zobrazí se tabulka Windows<sup>TM</sup>
- 2) Vložte CD-ROM do diskové jednotky.
- 3) Otevřete ovládací panel.
  - Klikněte na „START“.
  - Najedte myší na „NASTAVENÍ“.
  - Klikněte na „OVLÁDACÍ PANELY“.
- 4) Dvakrát poklepejte myší na ikonu „PŘIDAT NEBO ODEBRAT PROGRAMY“.
- 5) Provedte vlastní instalaci
  - Klikněte na tlačítko „NAINSTALOVAT“
  - Řiďte se pokyny v počítači
  - Program je nainstalován ve Vašem osobním počítači.