

CELIMED


LATEX FREE		Není vyrobeno z latexu
		Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.
		Referenční katalogové číslo
		Manžeta Easy Cuff
		Manžeta Intelli Wrap
		Komfortní manžeta
		Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko
		Datum výroby
		Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti
		Obvod paže
Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejlím balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.		

CELIMED

Popis symbolů	
	Označení CE
	Značení UKCA
	Číslo šarže
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.

CELIMED

OMRON

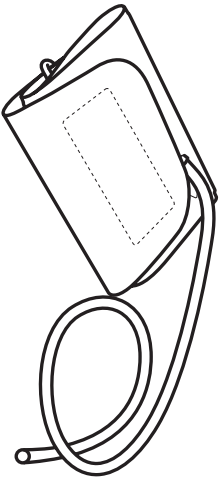

Střední manžeta CM2

Střední manžeta

• Návod k obsluze

2 CZ

		Výrobce OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunitsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
		Zastupce pro EU OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hooftdorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU		OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
Výrobní závod		OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
		CELIMED s.r.o. Sociální péče 3467/5a, 400 11 Ustí na Labem požárníci servis – tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz
Distribuce a servis pro ČR		CELIMED s.r.o. Sociální péče 3467/5a, 400 11 Ustí na Labem požárníci servis – tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s příslušným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

Vyrobeno v Číně

All for Healthcare

IM-HEM-CR24-E-CZ-07-10/2022

Datum vydání: 2022-10-27


CELIMED

Údržba

- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mydla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné tekavé kapaliny.
- Manžetu neskládujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neodhýbejte ani nemackejte.
- Nepřikládejte manžetu přes silné oděvy a nevyhmnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte k podepření lokte polštářek nebo jinou vhodnou podložku.
- Manžetu ušetřete tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.
- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.
- 3. Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

Pokyny

CELIMED

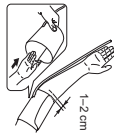


Měření na pravé paži

Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

Ujistěte se, že manžeta je správně umístěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

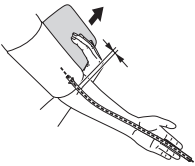


2.

2. Dejte paži do správné polohy.

- 1) Vzduchová hadička by měla vést po vnitřní straně předloktí směrem do dlaně, rovnoběžně s prostředním článkem.
- 2) Dolní část manžety se musí nacházet přibližně 1 až 2 cm nad loketním ohybem.
- 3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

OMRON

Střední manžeta CM2 (HEM-CR24)

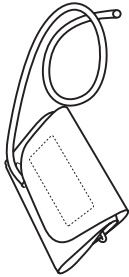

CELIMED

Děkujeme vám za zakoupení střední manžety od společnosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro paži o obvodu 22 až 32 centimetrů. Viz originální návod vašeho měřiče krevního tlaku.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod.


Návod si ponechte pro budoucí použití. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne Váš OŠETŘUJÍCÍ LÉKÁŘ.

Upozornění:


Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Tato manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON.
- Tato manžeta funguje pouze s monitory krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-CR24, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástrčky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze

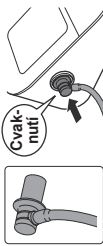

1.

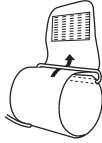

Zasuňte vzduchovou zástrčku pevně do vzduchového konektoru.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástrčku dle obrázku nalevo, zaveďte ji do vzduchového konektoru až do polohy, kde zapadne.

Nasazení manžety

1. Proložte levou paži skrz smýčku manžety.
- Poznámka:** Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smýčka. Hladká látka musí být uvnitř smýčky manžety.

CELIMED